



Refyzzius Hygiëne protocol

Standpunten hygiëne maatregelen


1. Een behandelbank wordt na elk gebruik gedesinfecteerd.
2. De zorgverlener die gebruik maakt van de behandelbank weet welk desinfectiemiddel gebruikt mag worden en hoe dit middel op de juiste wijze gebruikt wordt.
3. Bij het desinfecteren draagt de zorgverlener handschoenen.
4. De desinfectie begint bij het hoofdgedeelte.
5. Standaard een hoes over de behandelbank is in deze tijden niet meer mogelijk. De cliënt wordt gevraagd een eigen handdoek mee te nemen of de bank kan op een andere wijze beschermd worden met bijv. een papieren afscherming die direct na iedere cliënt verwijderd wordt.
6. Voor desinfectie wordt een product gebruikt waarbij de werking tegen bacteriën en virussen aantoonbaar is.
7. Indien de bekleding van een behandelbank of onderzoekstafel niet intact is, kan deze op de versleten of gescheurde plekken niet gereinigd en zeker niet gedesinfecteerd worden. De versleten bekleding dient direct vervangen te worden.

Gebruik van het desinfectiemiddel

MikroZid® universal wipes




Was handen met zeep

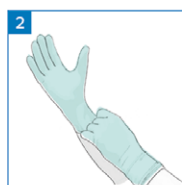

Doe handschoenen aan




Open het pak en trek de doekjes eruit

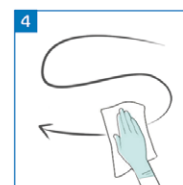

Maak schoon in een S-beweging



Laat het product 15 seconden intrekken

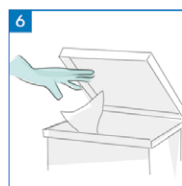

Gooi de doekjes weg



Sluit het deksel luchtdicht af

► Kijk voor de volledige informatie en de diverse inwerktijden aangaande de microbiologische werkzaamheid op het productinformatieblad.