




Refyzzius Hygiëne protocol

Standpunten hygiëne maatregelen


1. Een behandelbank wordt na elk gebruik gedesinfecteerd.
2. De zorgverlener die gebruik maakt van de behandelbank weet welk desinfectiemiddel gebruikt mag worden en hoe dit middel op de juiste wijze gebruikt wordt.
3. Bij het desinfecteren draagt de zorgverlener handschoenen.
4. De desinfectie begint bij het hoofdgedeelte.
5. Standaard een hoes over de behandelbank is in deze tijden niet meer mogelijk. De cliënt wordt gevraagd een eigen handdoek mee te nemen of de bank kan op een andere wijze beschermd worden met bijv. een papieren afscherming die direct na iedere cliënt verwijderd wordt.
6. Voor desinfectie wordt een product gebruikt waarbij de werking tegen bacteriën, virussen en in het bijzonder de COVID-19 aantoonbaar is.
7. Indien de bekleding van een behandelbank of onderzoekstafel niet intact is, kan deze op de versleten of gescheurde plekken niet gereinigd en zeker niet gedesinfecteerd worden. De versleten bekleding dient direct vervangen te worden.

Gebruik van het desinfectiemiddel tegen Covid-19

Refyzzius Desinfectiemiddel

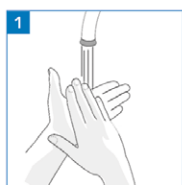

Was handen met zeep

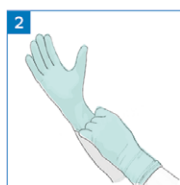


Doe handschoenen aan




Spray direct op het oppervlak




Laat 1 tot 2 minuten inwerken

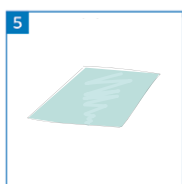

Pak een schone microvezeldoek

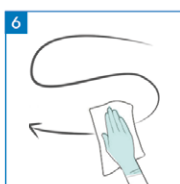

Wrijf het oppervlak droog

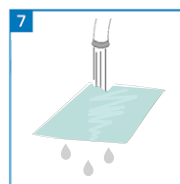

Spoel de doek schoon



...voor een volgende desinfectie

► Kijk voor de volledige informatie en de diverse inwerktijden aangaande de werkzaamheid op het productinformatieblad.